

1

APSAUGOKITE

Uždėkite vienkartinį uždangalą ant Veinlite.

2

DEZINFEKUOKITE

Nuvalykite vienkartinį uždangalą su dezinfekavimo priemone ar alkoholiu.

3

SURASKITE VENAŲ

Laikykite prietaisą virš odos.

Ijunkite prietaisą.

Oranžinės šviesos tinka šviesesnės odos tonams ir venoms esančioms odos paviršiuje.

Raudonos šviesos tinka tamsesnės odos tipams ir venoms esančioms giliau.

Abejos šviesos tinka didesniai kontrastui.


Skanuokite statmenai link venos. Skanuokite pirmyn ir atgal. Dėl šviesos sugerimo venos matysis kaip tamsios linijos.



4

NUSTATYKITE VENAŲ

Pakreipkite Veinlite 90 laipsnių kampu – lygiagrečiai su vena.

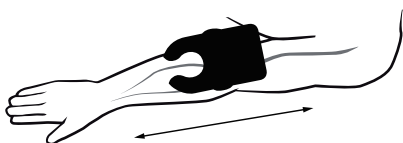


5

UŽFIKSUOKITE VENAŲ

Nedominuojančios rankos nykščiu lengvai paspauskite ir atspauskite prietaisą. Prietaisas patempis ir suspaus odą.

Tuomet vena turėtų būti pakelta naudojant Veinlite kaip turniketą.


Turniketo naudojimas yra neprivalomas.

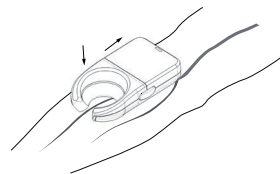

6

PRIĖJIMAS PRIE VENOS

Dominuojančia ranka suleiskite adatą į veną pro Veinlite tarpą.

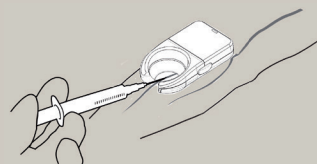

7

NUIMKITE VEINLITE

8

IŠMESKITE

Tinkamai utilizuokite plastikinį uždangalą.

ADAPTERIAI:

Lengva Apsauga: Naudokite jei apšvietimas patalpoje yra per šviesus

Pediatrinis Adapteris: Uždėkite Pediatrinį Adapterį prieš uždėdant vienkartinį uždangalą ir toliau sekite instrukcijas.